


ゴムカバーの装着方法

*プローブが濡れていると滑りが悪くなり
ゴムカバーに入れ難くなります。
水分は良く拭き取ってから装着下さい。


- ①. ゴムカバーの縁部分を摘みます
強く摘むと、爪で傷つけ易いので、御注意下さい

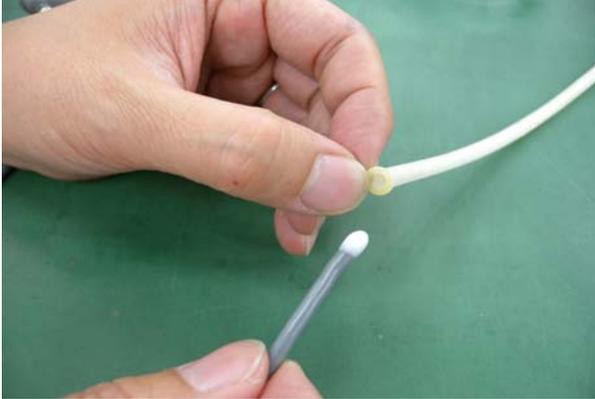

- ②. プローブの先端(白い部分)を差し込みます
引っ掛かる場合は、縁を持ち直すと入ります



- ③. 5センチ位まで、引っ掛からないようにゆっくりと
挿入していきます

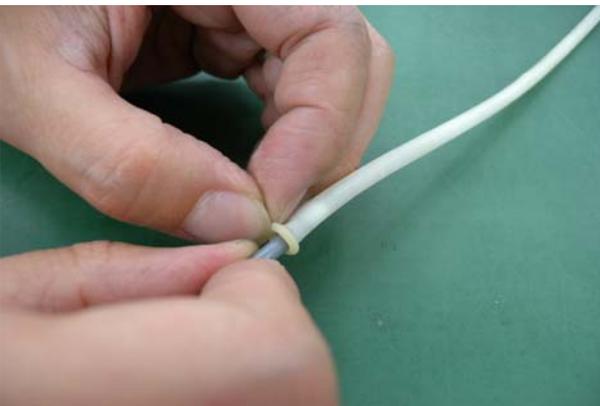

悪い例

ゴムカバー本体を持つと縁部分を
巻き込み易くなります。



巻き込んだ例



- ④. 縁を離さずに入れていきます



- ⑤. 装着完了



指定管理医療機器

再使用可能な能動型機器接続体温計プローブ

認証番号 20200BZZ00551000

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: 日機装サーモ株式会社

住所: 東京都武蔵野市境2丁目4番24号

TEL 0422-37-9811 FAX 0422-37-9820